

DIAFLAM

PÂTE DIAMANTÉE

- La pâte diamantée Diaflam doit ses hautes performances à une concentration en diamant beaucoup plus importante que ses concurrentes.
- Elle est utilisable aussi bien sur les céramiques (glaçage mécanique) que sur le métal Nickel-Chrome ou Cobalt-Chrome (brillantage des couronnes).

ÉTAPES

POUR LA CÉRAMIQUE

1. Avec un polissoir en feutre, étendre une petite quantité de pâte diamantée en tournant à très faible vitesse puis à 1000 tours/minute environ.
2. Augmenter la vitesse progressivement en appuyant pour atteindre 10 000 tours/minute environ.
3. Finir avec un polissoir en fil coton.

POUR LE MÉTAL

Même protocole et utilisez une petite brosse «bison» pour les creux que le polissoir coton ne peut atteindre.