

Conseils d'utilisation

Solution de refroidissement pour les procédures de détartrage.

Assure la décontamination et le nettoyage des conduits d'eau de l'unité dentaire pendant 7 jours.

La bouteille de LINES se fixe facilement à la plupart des systèmes de séparation air-eau.

Mode d'emploi

Hygiène bucco-dentaire

Remplir le réservoir avec LINES. On peut diminuer le débit de LINES à 2-4mL/minute pour réduire les éclaboussures d'eau et améliorer la visibilité. Cette solution va diminuer les mauvaises odeurs qui se produisent pendant les procédures tout en réduisant les aérosols microbiens.

Entretien des conduits d'eau des unités dentaires

Utiliser LINES une fois par semaine dans les conduits d'eau lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.

Étape 1 : Purger l'air dans les conduits d'eau.

Étape 2 : Faire couler 30-60mL de LINES dans l'unité dentaire jusqu'à ce que le fluide soit visible à la sortie.

Étape 3 : Laisser agir la solution pendant la nuit, le weekend ou pendant une période prolongée. Lors de l'activation laisser couler l'eau dans les conduits d'eau.

Utilisation pour la première fois

Faire circuler intensément l'eau dans les tuyaux. La solution peut enlever de grandes quantités de biofilm.

Avertissement

Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ou des peroxydes.

Précaution

P102 (S2) : Tenir hors de portée des enfants.

Premiers secours

P301 (S62) : En cas d'ingestion faire boire beaucoup d'eau ou de lait.

P305 (S26) : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Élimination

Récipient non rechargeable, recyclable.

Ne pas réutiliser.

Producteur.

Représentant autorisé dans la Communauté Européenne.