

Un formidable duo pour sécuriser les collages



CRB – Ceraresin Bond

Avec le procédé **Ceraresin Bond** vous avez la solution de coller différents matériaux (résine et céramique) de façon sûre et durable. **Ceraresin Bond** s'utilise en intra ou extra-oral.

Le système adhésif permet la restauration et la modification rapide des éclats / cassures sur céramique avec des matériaux résines polymérisables et composites photo polymérisables. Toute combinaison sur céramique avec **CRB** devient accessible en un temps record. Ainsi plus aucune limite ne s'oppose à la réalisation personnalisée de dents prothétiques associée à un adhésif haute performance et offrant des caractéristiques de liaison optimale.

Les réactifs **Ceraresin Bond** résistent extrêmement bien à l'humidité et aux contraintes thermiques.




Proven Products for Better Dentistry

Sécuriser les collages sans aucun compromis

Ceraresin Bond apporte une haute fiabilité dans la liaison entre les composites (photo ou auto polymérisables) et les céramiques.


Les manipulations sont aisées et conviennent à toutes les indications intra / extra-oral rencontrées dans les cabinets dentaires ou laboratoires de prothèses.

L'utilisation de **CRB** garantit à très long terme une liaison parfaite.

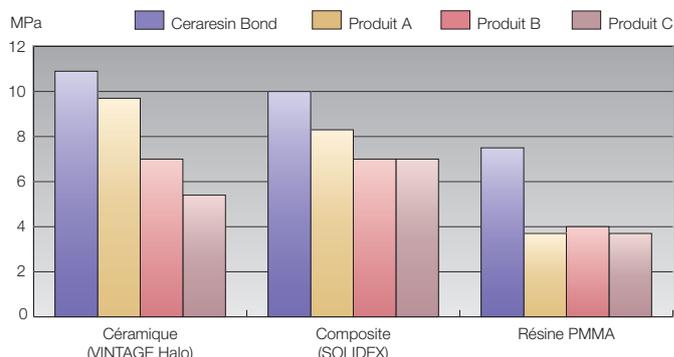


Résistance à l'adhésivité de **Ceraresin Bond** dans la liaison composite / céramique face à d'autres fabricants.

Application simple et rapide

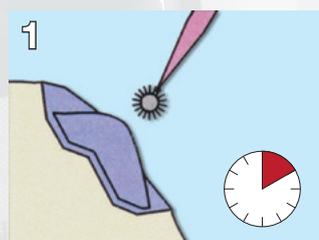

Appliquer CRB 1 / laisser 10 secondes

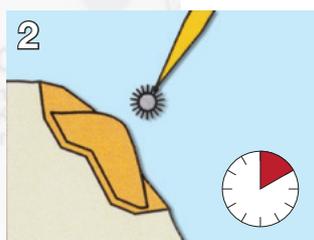

Appliquer CRB 2 / laisser 10 secondes

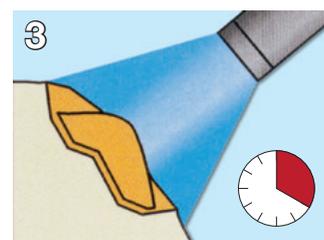


Photo polymériser pendant 20 secondes / prêt pour l'application du composite

Multiples possibilités

- Utilisation intra et extra-oral
- Restauration de couronnes ou de bridges céramiques avec des composites de reconstitution
- Modification de dents artificielles (résine ou céramique) à l'aide de composites
- Adhésion optimale de résines auto polymérisables sur composites photo polymérisables
- Accroissement de l'adhérence des dents acryliques avec liaisons croisées sur les résines prothétiques auto polymérisables
- Combinaison avec le système adhésif M.L. Primer pour des restaurations sur métal



Kit CRB, Réf. 1741



SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17 · 40878 Ratingen / Allemagne
Tél: +49 (0) 21 02 / 86 64-0 · Fax: +49 (0) 21 02 / 86 64-64
E-mail: info@shofu.de · www.shofu.de