

# ZIRTOOTH<sup>®</sup> MULTI NEO

DISQUES ZIRCONE MULTI-COUCHES

HAUTEMENT TRANSLUCIDE



CE  
2195



HASS | Human-Aid  
System Supplier

SOCIÉTÉ DES CENDRES, LA TRADITION DE L'INNOVATION

[www.sdc.fr](http://www.sdc.fr)

## PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE

Haute translucidité similaire à la dent naturelle afin de s'intégrer parfaitement en bouche.

Sa méthode de fabrication brevetée de la zircone multi-couches permet d'obtenir une résistance à la flexion élevée.

## TECHNOLOGIE ZIRTOOTH®

Les disques de zircone Zirtooth® sont fabriqués 100% poudre Tosoh Yttria (YTZ) de première qualité, utilisant le dernier processus d'hydrolyse et la nanotechnologie, résultant une résistance à la flexion et à la rupture plus élevées.



TOSOH

## TRANSMISSION

Résistance

Multi-couches

600MPa

1200MPa



Incisal


Body

Cervical



## MULTI NEO

Translucidité  
Résistance  
Esthétique

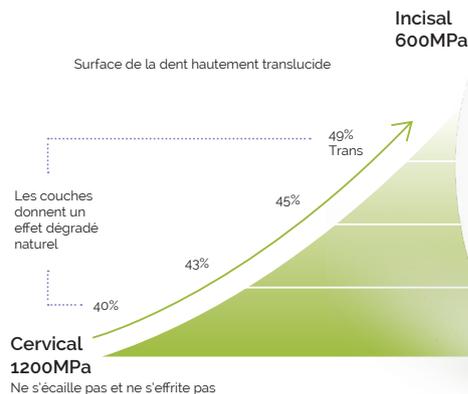

Résistance  
à la flexion  
**1200+600MPa**

Température  
finale de frittage  
**1500°C**

Indications  
**Restauration  
complète**

## PROGRAMME DE FRITTAGE

Étape	1	2	3
Température	Température ambiante - 1000°C	1000°C - 1500°C	1500°C - Température ambiante
Chauffe	Max 9°C	Max 3,5°C	Max 9°C
Temps d'attente	-	2 heures	-

## INDICATIONS




## CAS CLINIQUE



Couronne postérieure avec Zirtooth®  
DTC. Hyeonjin Jo, Natural Dental Lab, Corée

# PRODUITS ET TEINTES DISPONIBLES

Systèmes	Référence	Dimensions (mm)
<b>Système ouvert</b> 	ZT9812	Ø98 x 12
	ZT9814	Ø98 x 14
	ZT9816	Ø98 x 16
	ZT9818	Ø98 x 18
	ZT9820	Ø98 x 20
	ZT9822	Ø98 x 22*
	ZT9825	Ø98 x 25*
<b>Zirkonzahn</b>  Zirkonzahn n'est pas une marque déposée par HASS	ZT9512	Ø95 x 12
	ZT9514	Ø95 x 14
	ZT9516	Ø95 x 18
	ZT9518	Ø95 x 16
	ZT9520	Ø95 x 20
	ZT9522	Ø95 x 22*
	ZT9525	Ø95 x 25*

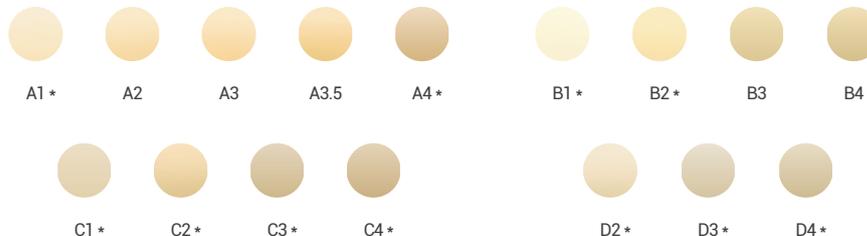

\* Non stocké, uniquement sur commande

Ce matériau est conçu pour une utilisation en dentisterie. Suivre les instructions. HASS n'est pas responsable des pertes causées dû au non-respect du mode d'emploi ou des précautions d'usage. Les usagers doivent tester les produits afin de vérifier la compatibilité pour tout usage qui ne serait pas indiqué dans les instructions. Les explications et données ne comportent aucune garantie et/ou obligation. Toutes les recommandations et restrictions ci-jointes s'appliquent lorsque le produit est utilisé avec des produits d'autres fabricants.