

Veracia SA ANTERIOR & POSTERIOR

Q³ : Quick Quality Quartet
PACK TIME SAVING!

Superbe esthétique
Gain de temps considérable




Une idée qui devient réalité

Des dentures fonctionnelles et confortables pour chaque âge

C'est la première fois qu'ont été pris en compte l'usure et l'état des dents naturelles restantes pour la mise au point des nouvelles dents semi-anatomiques Veracia SA.

La gamme des dents anatomiques Veracia a servi de base de développement. L'idée était de conserver les caractéristiques fonctionnelles des Veracia tout en aménageant des zones d'abrasion dans des secteurs précis.

Il en résulte de meilleures performances masticatrices, un plus grand confort dans les zones d'usure car la denture est mieux stabilisée et une réduction du stress au niveau de l'ATM.

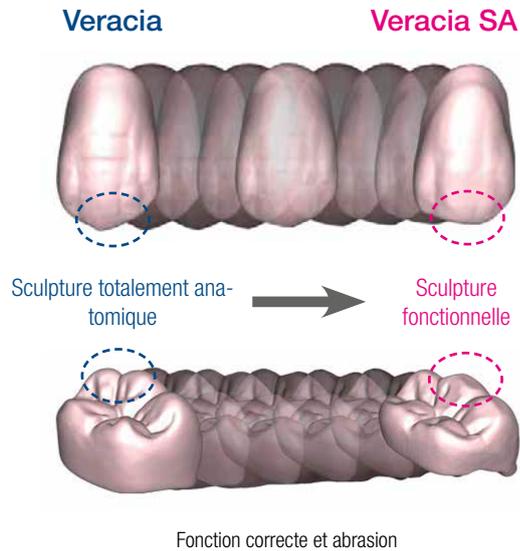

Montage convenant à tous les systèmes d'occlusion et de formes

Avec Veracia SA, vous n'êtes lié à aucun concept occlusal.

Les postérieures antagonistes se positionnent avec précision grâce à une structure claire en occlusion centrée et des zones d'abrasion logiquement placées.

- Occlusion balancée
- Occlusion linguale
- Occlusion intermaxillaire
- Occlusion cuspidé fosse



Côté balancé




Côté travaillant

Conception occlusale unique avec espaces physiologiques


Des espaces concaves ont été systématiquement ajoutés aux zones occlusales des Veracia SA postérieures dans le sens fonctionnel des mouvements mandibulaires. Les blocages centraux des postérieures anatomiques ont été supprimés et les espaces correspondants ont été ajoutés.

Cette particularité procure une situation initiale idéale en occlusion balancée ou linguale car aucune correction abrasive n'a lieu d'être après montage.

De plus, ces espaces permettent au patient de trouver facilement son occlusion statique avec des forces latérales de cisaillement réduites au minimum.

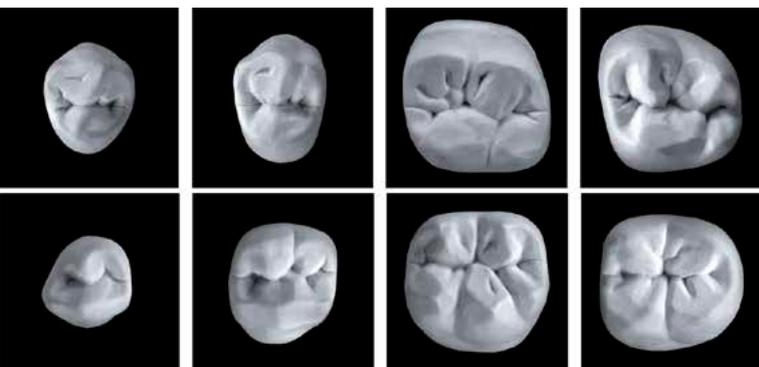


Les profonds sillons occlusaux associés aux facettes abrasives pour des mouvements spécifiques permettent un alignement simple et sans erreur lors du montage qui se verra doté de meilleures performances masticatrices sur la prothèse finie.

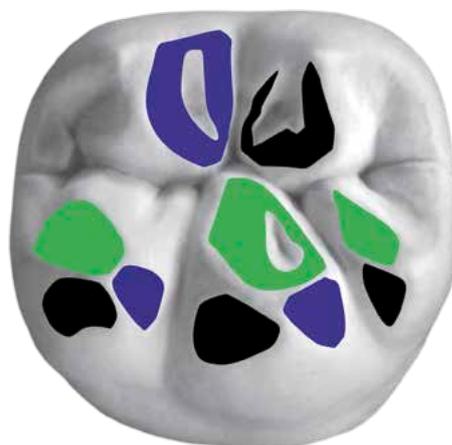

- Latérotusion
- Médiotusion
- Protrusion

Des dents qui trouvent leur place

Veracia SA vous aide à devenir plus efficace dans vos travaux quotidiens de prothèse adjointe car leur conception fonctionnelle innovante fait que les dents postérieures se mettent presque toutes seules en place.

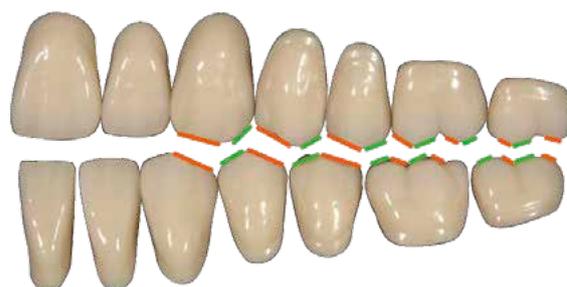

Un, Deux, Q³ Pack ... terminé!

Esthétique et fonction plus un formidable gain de temps


La forme physiologique des dents postérieures Veracia SA nous a amené à concevoir une présentation sans cire entièrement inédite sous la forme d'une gouttière directement prête au montage, le Q³ Pack. Pour la première fois, ce Q³ Pack permet un montage rapide et précis des postérieures en relation fonctionnelle et ce quel que soit le type d'articulateur utilisé.



Le Q³ Pack réduit le temps de montage de huit postérieures Veracia SA à un couple de minutes. Plus besoin de préparation longue ni d'équipement complexe.

Le Q³ Pack procure les relations de contact adéquates des postérieures Veracia SA. Les meulages de correction fonctionnelle sont réduits au minimum.

Le Q³ Pack contient des postérieures individuelles permettant des ajustements personnalisés.

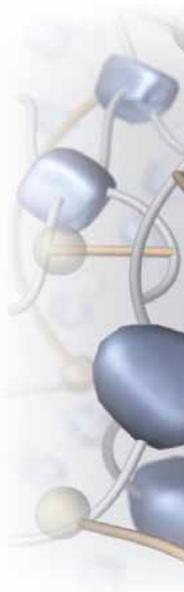

Un montage fonctionnel en seulement 3 étapes



1
Le montage des antérieures et de la cire est réalisé comme habituellement. Placer le bord mésial de la gouttière Q³ Pack à la canine et l'aligner distalement sur la ligne alvéolaire.



2
Contrôler ensuite la bonne position des languettes dans l'alignement horizontal du plan de morsure et mettre les dents en cire.



3
Une légère pression sur la languette dégage la gouttière.




Terminé
Comblé les espaces interdentaires à la cire – c'est terminé.



Des propriétés physiques exceptionnelles grâce à la technologie composite MF-H

Les dents Veracia SA sont fabriquées en composite MF-H (hybride microchargé) renforcé de verre stratifié. Cette structure homogène présente d'excellentes propriétés physiques d'une cohérence remarquable.

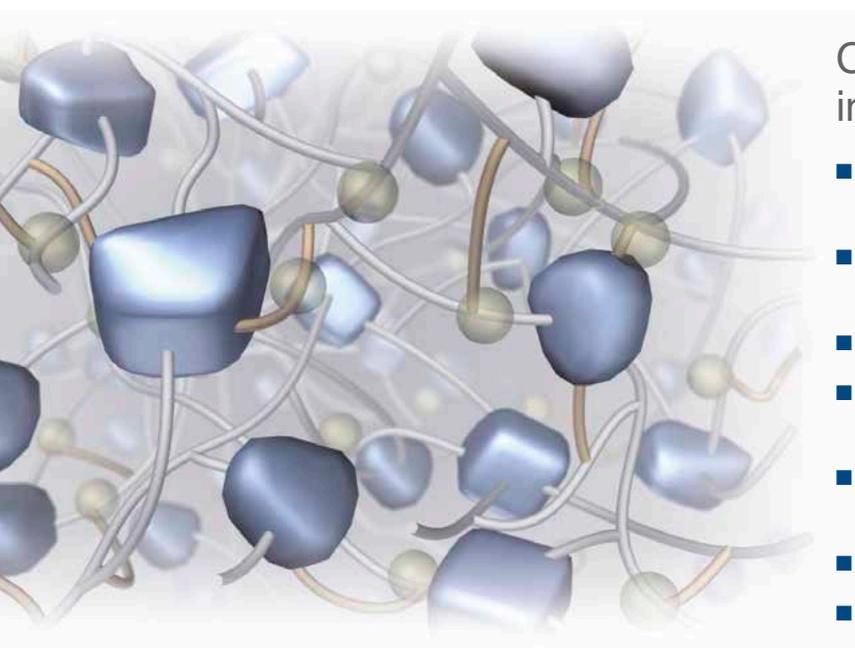

Ce qui rend Veracia SA indispensable

- Anatomie fonctionnelle adaptée à l'âge
- Indépendance par rapport à chaque concept occlusal
- Gain de temps au montage
- Occlusion équilibrée due au seul montage
- Haut degré de précision pour l'utilisateur
- Plus d'efficacité au laboratoire
- Prothèses constantes en qualité

SIMPLE

Aucun équipement spécial

EFFICACE

Plaquette sans cire =
Support de montage

RAPIDE

Aucune préparation fastidieuse

PRECIS

Les relations de contact sont
toujours correctes

INDEPENDANT

Convient à tout modèle
d'articulateur

Grâce à la nouvelle voie de montage des dents avec **Q³ Pack**, vous économisez un temps de montage considérable.



Veracia SA Anterior

Les techniques de fabrication assistées par ordinateur garantissent la parfaite symétrie des antérieures et postérieures ainsi que le respect intégral des dimensions indiquées en fonction des tailles.



Carrée

S4	43,0 9,2 7,9	
S5	45,7 9,8 8,4	
S6	48,5 10,4 8,9	



Rectangulaire

ST4	43,5 9,6 8,0	
ST5	46,3 10,2 8,5	
ST6	49,0 10,8 9,0	




Ovale

O4	43,4 10,4 8,0	
O5	46,2 11,0 8,5	
O6	49,0 11,7 9,0	



Plus abrasive

MA4	32,5 9,4 4,7	
MA5	34,6 10,1 5,0	
MA6	36,7 10,7 5,3	
MA7	38,8 11,3 5,6	

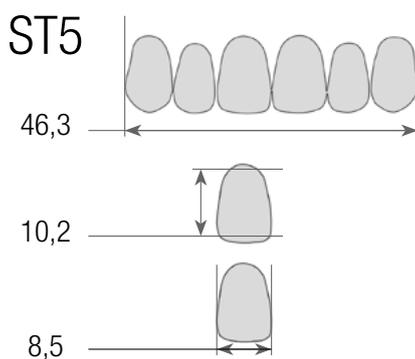

Les antérieures et postérieures sont disponibles dans les teintes VITA* Classical suivantes: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 ainsi que dans la teinte SHOFU Whitening W1.


Q³ Pack sont disponibles dans les teintes A2, A3 et A3,5.

Veracia SA Posterior & Q³ Pack



Les Veracia SA postérieures sont disponibles soit en plaquette classique soit en présentoir sans cire Q³ Pack.



S28	28,0		Veracia SA Posterior et Q ³ Pack
	8,7		
S30	30,0		Veracia SA Posterior et Q ³ Pack
	9,4		
S32	32,0		Veracia SA Posterior Q ³ Pack
	10,0		
S34	34,5		Veracia SA Posterior Q ³ Pack
	9,9		

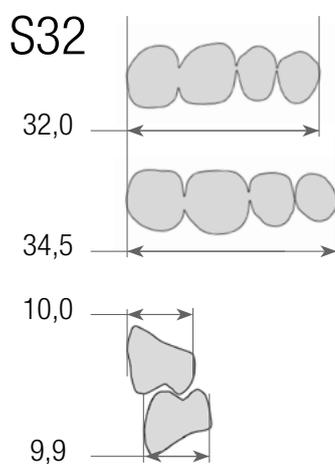

Correspondance antérieure haut / bas

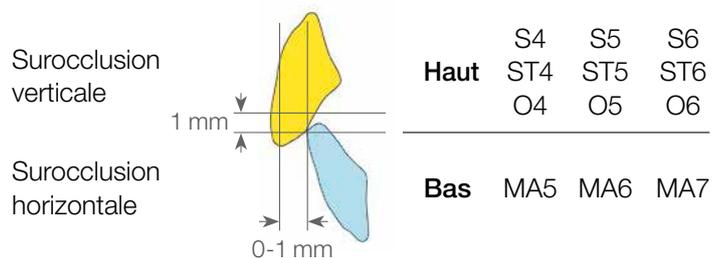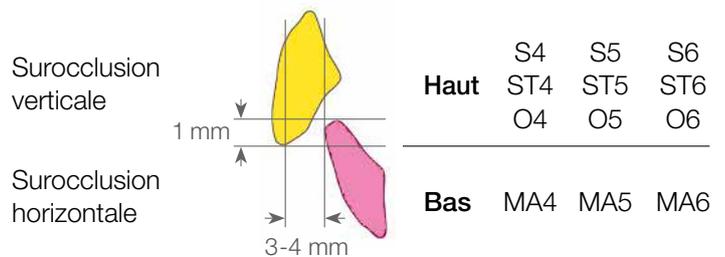

Les données sont en millimètres

Composants du système



Veracia SA - Posterior

1 forme maxillaire et mandibulaire en tailles S28, S30, S32, S34



Veracia SA - Posterior **Q³ Pack**

1 forme maxillaire et mandibulaire en tailles S28, S30, S32, S34



Veracia SA - Anterior

3 formes maxillaires en tailles 4, 5 et 6

- S (carrée)
- ST (rectangulaire)
- O (ovale)

1 forme mandibulaire en tailles 4, 5, 6 et 7

- MA (plus abrasive)



Veracia SA - 28 Teeth Set A2 / A3

1 plaquette antérieure maxillaire (ST6)

1 plaquette antérieure mandibulaire (MA6)

1 **Q³ Pack** jeux de chaque plaquette postérieure (maxillaire/mandibulaire taille 32)

Réf. A2ST66 / A3ST66



Veracia SA - AP Full Set

13 plaquettes antérieures

(9 maxillaires/4 mandibulaires)

6 jeux de plaquettes postérieures

(S30, S32, S34: 3 maxillaires/3 mandibulaires)

Réf. FSA3

* VITA est une marque déposée de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne.

