



1er aperçu des paramètres de la courbe d'interface

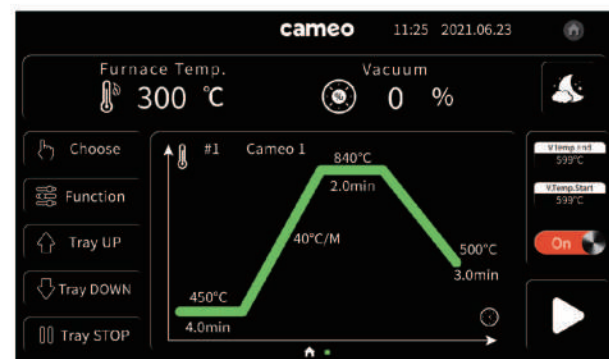

2ème interface choisir directement la courbe intégrée

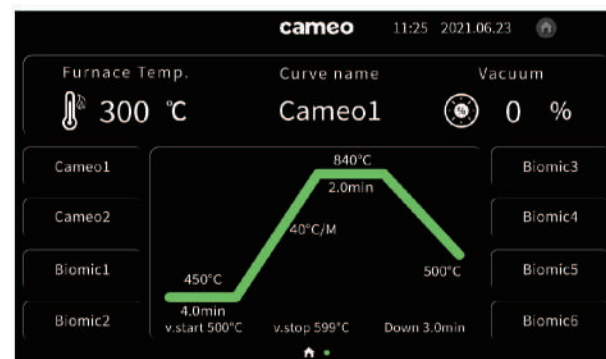

cameo®
Porcelain Furnace

CFP-200 Four pour céramiques

Contrôle intelligent de la température | Cuisson sous vide aérodynamique
Pompe fournie | 112 + 8 programmes intégrés

8 paramètres pré-définis pour le disilicate de lithium Cameo et les stains/glaze Biomic

	Temps de séchage (min)	Temp. de départ(°C)	Vitesse (°C/min)	Température (°C)	Temps de maintien (min)	Temp. de refroidissement (°C)
Cameo 1	4	450	40	840	2	500
Cameo 2	4	450	40	840	6	500

Cameo 1 : disilicate de lithium Cameo - programme facette/inlay
Cameo 2 : disilicate de lithium Cameo - programme couronne/bridge

	Temps de séchage (min)	Temp. de départ(°C)	Vitesse (°C/min)	Température (°C)	Temps de maintien (min)	Temp. de refroidissement (°C)	Temps de refroidissement (min)
Biomic 1	8	450	55	730	1	500°C	-
Biomic 2	8	450	55	720	1	500°C	-
Biomic 3	2	450	99	720	0.5	500°C	-
Biomic 4	8	450	40	730	1	400°C	5
Biomic 5	10	450	30	730	1	400°C	10
Biomic 6	1 min	400°C	50°C/min	900°C	5 min	400°C	-

Biomic 1 : Premier frittage (pâte 2D/pâte 3D/Glaze-F)
Biomic 3 : Utilisation de la Glaze-F seule
Biomic 5 : Frittage d'un bridge long en zircone

Biomic 2 : Second frittage (pâte 2D/pâte 3D/Glaze-F)
Biomic 4 : Frittage d'un bridge long en zircone
Biomic 6 : Programme de frittage Biomic LiSi




Société Des Cendres
13 rue du Général Mocquery, 37550 Saint-Avertin
01 49 61 41 41 - info@sdc.fr - www.sdc.fr



Aidite®
en.aidite.com

Cameo CFP-200 Four à porcelaine

Des stains & glaze à la cristallisation, le CFP-200, entièrement équipé, répond aux exigences des laboratoires dentaires. Le système de contrôle avec de l'intelligence artificielle maintient la température avec précision à toutes les étapes du processus de chauffe et de refroidissement. Doté d'une technologie de chauffe par tube de quartz et d'une structure de plateau ultra-étanche pour maintenir le four propre et prolonger sa durée de vie, le CFP-200, fiable et convivial, produit toujours de magnifiques restaurations.

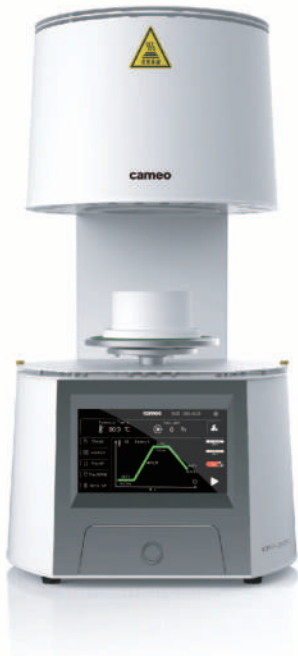


Taille	362*316*596mm
Poids/colis	28KG/34KG
Vitesse de chauffe	1°C~100°C/min
Taille de la chambre	95mm*65mm
Appareil de chauffe	Tube de quartz en spirale et fil en nickel-chrome
Modèle	CFP-200
Voltage	220V/110V AC 50/60Hz
Température maximum	1100°C
Aspiration	Vmax= 95%
Précision de la température	±1°C
Refroidissement	Ventilateur
Garantie	1 an
Puissance	1.5KW
Structure du four	Plateau élévateur
Système de contrôle temp.	Contrôle intelligent de température par IA

*Programme de frittage Biomic et de cristallisation du disilicate de lithium Cameo intégrés

CFP-200 programme de frittage sous vide

Le contrôle intelligent de l'IA adapte la pompe sous vide à chaque programme spécifique, garantissant un environnement stable pour une densité maximale. Grâce au Biomic, l'environnement sous vide unique et la stabilité de température multi-niveaux créent un effet esthétique époustouflant.

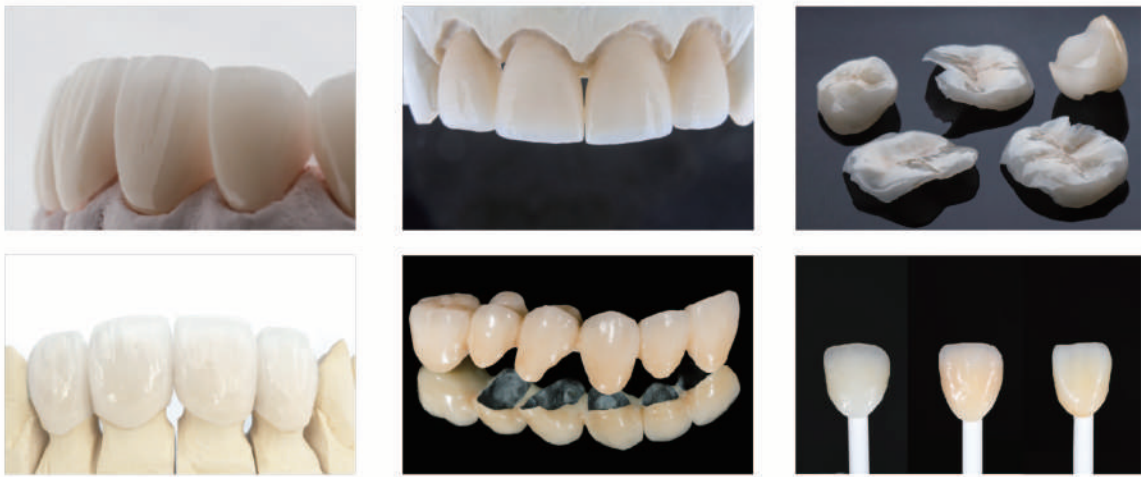

Gestion des courbes

- 120 programmes disponibles



Système de cuisson et refroidissement

- Plusieurs niveaux de chauffe et refroidissement
- Système de refroidissement automatique et température de refroidissement réglable



Contrôle de température par IA

- Technologie de foyer intelligent
- Qualité de chauffe sous vide de niveau aérodynamique



Ruban de lumières LED

- Le ruban de LED permet des alertes plus précises



Programmes et écran tactile

- Écran tactile 7 pouces
- 112 + 8 programmes intégrés



Composition

- Structure à ressort
- Plaque de refroidissement bilatérale



Boîte à outils

- Conception de stockage d'outils portables



Bouton de veille

- Fonction d'économie d'énergie

Champs d'application

- Zircon Glaze
- Cuisson pour disilicate de lithium
- Programme «deuxième étape»
- Adapté à différentes poudres de céramique