

## **AVERTISSEMENT & PRÉCAUTIONS**

### **POUR ALLIAGES**

1. Toutes nos fournitures sont identifiées par un numéro de lot, dans un souci de traçabilité, il est recommandé de reporter ce numéro sur la fiche du patient.
2. Le produit n'exige aucune précaution particulière de conservation. Le produit doit être utilisé avant la date limite indiquée sur le conditionnement.
3. N'utiliser que des produits d'apport brasage adaptés au coefficient de dilatation de l'alliage. Respecter les indications fournies par le fabricant du matériau de soudage ou de brasage.
4. Les alliages au Co-Cr peuvent rarement produire des dermatites sur les sujets sensibles. On conseille un test de contact (patch test).
5. Vérifier avant l'application de la prothèse s'il existe d'autres dispositifs métalliques dans la cavité buccale du patient. En présence de métaux différents il peut se produire un effet galvanique susceptible d'entraîner un phénomène de corrosion.
6. Les poussières de métal sont nocives pour la santé, pendant la fusion et le polissage, utiliser un système d'aspiration approprié.
7. Les patients doivent être informés que les alliages dentaires peuvent influencer les résultats d'IRM.